

INSTRUÇÕES DE USO

EQUIPAMENTO:

MESA REGULÁVEL PARA EXAME E TRATAMENTO - MODELO: PHR-700



INSTRUÇÕES DE USO

Parabéns por adquirir esta MESA REGULÁVEL PARA R.P.G. MODELO PHR-700 da SOPHIA MÓVEIS.

Este é um produto aprovado no Brasil por Ph. E. Souchard, o qual permite a aplicação confortável do método, tanto para o Terapeuta quanto para o Paciente.

“A Reeducação Postural Global, mais frequentemente designada por suas iniciais RPG, é um método original e revolucionário nascido da obra “O Campo Fechado” publicado por Ph. E. Souchard em 1981, depois de quinze anos de pesquisa no domínio da ginástica postural.

Obrigado por escolher um produto SOPHIA MÓVEIS.

SOPHIA MÓVEIS e Componentes LTDA. Epp.
Rua Otacílio Ferraz Pacheco, 220 – Vila Independência CEP: 16300-000, Penápolis – SP
CNPJ: 09.627.437/0001-24 Inscr. Est. 521.144.831.115
E-mail: atendimento@sophia.ind.br Fone/Fax (18) 3652.2807

EQUIPAMENTO:Nome Técnico: **MESA PARA FISIOTERAPIA**Nome Comercial: **MESA REGULÁVEL PARA EXAME E TRATAMENTO**Modelo Comercial: **PHR-700**

Marca: SOPHIA MÓVEIS

Fabricante:**SOPHIA MÓVEIS e Componentes LTDA. Epp.**

Rua Otacílio Ferraz Pacheco, 220 – Vila Independência

CEP: 16300-000, Penápolis – SP

CNPJ: 09.627.437/0001-24 Inscr. Est. 521.144.831.115

E-mail: atendimento@sophia.ind.br Fone/Fax (18) 3652.2807

Responsável Técnico: João Orives Sophia CREA-SP N° 0601537989

Cadastro ANVISA N° 80531300003**ATENÇÃO**

Para Maior Segurança:

- a – Leia e entenda todas as instruções contidas nesta Instrução de Uso antes de instalar ou operar este produto.
- b – Certifique-se de que todas as instruções estejam informadas no conteúdo deste manual.

NOTA: Este manual deve ser lido por todos os operadores deste produto.**CONTEÚDO**

1 – Identificação	3
1.1 – Nome e Modelo	3
1.2 – Descrição do produto	3
1.3 – Princípio Físico e fundamentos da tecnologia do produto	3
1.4 – Partes e acessórios acompanhantes	4
1.5 – Opcionais, materiais de consumo e materiais de apoio	4
1.6 – Especificações e características técnicas	5
2 – Condições especiais de armazenagem, conservação e/ou manipulação do produto	6
3 – Instruções para uso do produto	6
4 – Advertências e/ou precauções a serem adotadas	7
5 – Desempenho do produto	7
5.1 – Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto	7
5.2 – Efeitos secundários ou colaterais indesejáveis e contra-indicações	7
5.3 – Segurança e eficácia do produto	7
6 – Instalação ou conexão a outros produtos	7
7 – Instalação, manutenção corretiva e preventiva	7
7.1 – Instalação do produto	7
7.2 – Manutenção corretiva	8
7.3 – Manutenção Preventiva e Conservação	8
8 - Procedimentos adicionais para reutilização	8
8.1 - Limpeza	8
8.2 - Desinfecção	8
8.3 – Acondicionamento	9
9 – Procedimentos adicionais antes da utilização do produto	9
10 – Precauções em caso de alteração do funcionamento do produto	9
11 – Sensibilidade a condições ambientais previsíveis nas situações normais de uso	9
12 - Precauções em caso de inutilização do produto	9
13 – Termo de responsabilidade	9
14 – Termo de Garantia	10

1 – IDENTIFICAÇÃO

1.1 – Nome e Modelo

Nome técnico: Mesa para Fisioterapia

Nome comercial: Mesa Regulável para Exame e Tratamento

Modelo comercial: PHR-700



1.2 – Descrição do Produto

O equipamento é constituído de uma estrutura reforçada, pintura resistente e excelente acabamento.

É um equipamento mecânico de apoio, sem partes elétricas, destinado ao uso em Clínicas e consultórios de Fisioterapia, o qual permitirá ao Terapeuta posicionar o paciente de acordo com a exigência do procedimento a ser realizado e melhor acomodamento do Terapeuta de acordo com a técnica utilizada. Possui movimentos suaves e de fácil acionamento.

A mesa é articulada e acionada mecânicamente, permitindo manter o paciente na posição ideal. O movimento de elevação é através de um sistema hidráulico acionado por pedal. O Tampo em madeira MDF revestida com curvim incorpora comandos de movimentos por manivela na cabeceira.

Fixação através de rodízios com trava.

1.3 – Princípio Físico e fundamentos da tecnologia do produto, aplicados para seu funcionamento e sua ação:

Conjunto mecânico, sem partes elétricas, acionado por um mecanismo hidráulico através de manivelas e pedais, para posicionar o paciente em procedimentos exigidos para a RPG.

Permite o posicionamento do paciente para todas as posições exigidas pela técnica.


Estrutura composta por três partes: Tampo, conjunto acionador e Chassis.

- Tampo: Fabricado em MDF revestido com EVA e curvim, dividido em 03 seções: cabeceira móvel através de conjunto parafuso/porca, tampo fixo e braços ajustáveis.

- conjunto acionador: formado por um pistão hidráulico acionado a pedais expostos e revestido com carenagem em aço com acabamento epóxi.

- Chassis: construído em aço tubular com acabamento epóxi.

1.4 – Partes e acessórios acompanhantes:

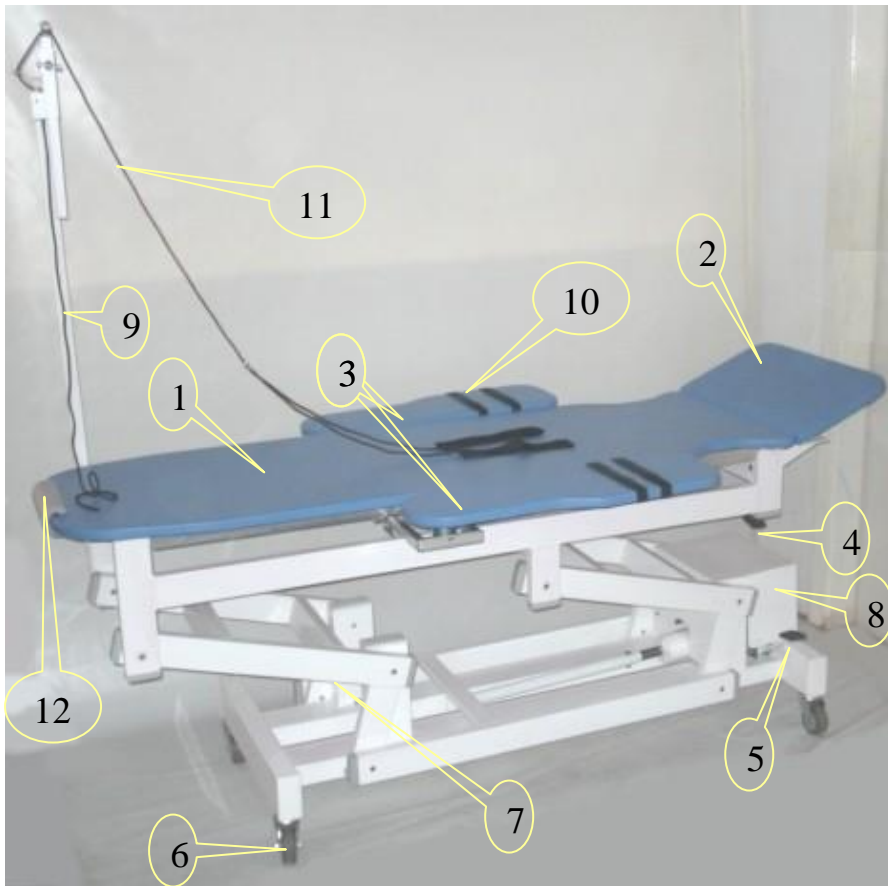

- A - LEITO ESTOFADO REVESTIDO COM EVA E CURVIM**
 1 – TAMPO FIXO
 2 – CABECEIRA AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO
 3 – BRAÇOS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, COM ROTAÇÃO DE 180°.
- B - ACIONAMENTO**
 4 – ALAVANCA DE SUBIDA
 5 – ALAVANCA DE DESCIDA
 6 – 4 unid. RODIZIOS, SENDO 2 COM TRAVA
- C - ESTRUTURA**
 7 – ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM PINTURA EPOXI.
 8 – CARENAGEM
 9 – HASTE REGULÁVEL E REMOVÍVEL COM SUPORTE DE PAREDE
- D - ACESSÓRIOS**
 10 – 4 unid. VELCROM
 11 – CINTA
 12 – CALÇO PARA OCCIPITAL

1.5 – Opcionais, materiais de consumo e materiais de apoio

a - Opcionais

<p>JOGO DE COLCHONETE PARA TAMPO E BRAÇOS</p>	
<p>JOGO DE LENÇOL</p>	
<p>APOIO DE CABECEIRA REGULÁVEL</p>	

SUPORTE PARA POSTURA BAILARINA	
CALÇO PARA OCCIPITAL	

b – Material de consumo:

- Não aplicado

c – Material de Apoio:

- Instruções de Uso

Itens de fabricação para uso exclusivo nos produtos da empresa:

Todas as partes, acessórios e opcionais descritos nesta Instrução de Uso e os demais não descritos, mas pertencentes ao equipamento são de uso exclusivo dos produtos da empresa.

Atenção: O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado ou previsto nestas Instruções de Uso é de inteira responsabilidade do usuário.

1.6 – Especificações e Características Técnicas:

MODELO	PHR-700
Classificação do produto segundo a ANVISA	
Classe de risco ANVISA	1 (Baixo Risco)
Movimentos	- Regulagem de altura - inclinação da cabeceira
Quantidade de pontos de acionamento	03
Capacidade de elevação	Pacientes de até 150 Kg
Dimensões do produto	Comprimento: 1,98m Largura sem os braços: 0,55m Largura com braços fechados: 1,01m Largura com braços abertos: 1,76m Altura máxima com a haste: 2,2m Altura: 1,05m (máx.) / 0,55m (min.)
Peso total líquido	96,4 Kg
Peso total bruto	134 Kg
Número de embalagens	01
Tipo de embalagem	Pallet de madeira e totalmente fechada em caixa de papelão triplex.
Dimensões da embalagem	2,03m x 0,60m x 0,67 m (comprimento x largura x altura)

Normas aplicadas ao processo de fabricação do equipamento (principais) Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos - RDC 59:2000 (ANVISA)

2 – Condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto:

ANTES DA INSTALAÇÃO:

Marcação na Embalagem

As informações referentes aos cuidados a serem tomados durante o transporte e armazenamento do produto são indicadas através de simbologia normalizada diretamente na embalagem.



Símbolo cuidado no transporte e armazenamento (frágil).



Símbolo necessidade de proteção contra umidade no transporte e armazenamento.



Símbolo de posicionamento de transporte e armazenamento (sentido para cima)

Armazenamento:

Manter em local protegido de chuva e sol direto, e em sua embalagem original.
No caso de armazenamento de diversas caixas do equipamento embalado, o empilhamento máximo deverá ser conforme indicado no símbolo de empilhamento na embalagem (máximo 2 unidades).

Transporte:

Durante o transporte evite vibrações e impactos no equipamento
Não deixe cair no chão.
Produto não empilhável.

APÓS A INSTALAÇÃO:

Acondicionamento:

Manter em local protegido de chuva e sol direto.

Conservação:

Quando em uso, limpar com pano úmido e sabão nos colchonetes e álcool nas demais partes.
Mantenha o equipamento limpo e desinfetado para a próxima utilização. Não permita que líquidos sejam inseridos no equipamento.
Não utilize solventes orgânicos como thinner para limpar o equipamento. Mantenha o equipamento em local limpo, longe de poeiras.

Nota: Veja item 8 - *Procedimentos Adicionais para Reutilização* e item 9 - *Procedimentos Adicionais Antes da Utilização do Produto*.

3 – Instruções para uso do produto

a) Posicionando o equipamento

- Para utilizar o equipamento, posicione a mesa no local desejado.

Nota: Para fixar a mesa, utilize a trava dos rodízios. (duas unidades diametralmente opostas realizam esta função)

b) Posicionando o paciente

- Conforme orientação do terapeuta, o paciente poderá ser posicionado nas diversas posições empregadas pelo método RPG.

4 – Advertências e/ou precauções a serem adotadas

- a) Advertências e/ou precauções durante o transporte e armazenamento:
- Não transportar a mesa deitada;
 - Por ser um produto frágil, devem-se tomar os cuidados para não deixá-lo cair no chão.
- b) Advertências e/ou precauções durante a instalação:
- A instalação deverá ser realizada exclusivamente por uma pessoa autorizada.
- c) Advertências e/ou precauções durante a utilização
- Este equipamento deve ser utilizado apenas por pessoal adequadamente treinado e sob a direção de equipe qualificada, familiarizada com os riscos e benefícios atualmente conhecidos da utilização de Mesas para RPG.
- d) Advertências e/ou precauções durante a limpeza
- Mantenha o equipamento limpo e desinfetado para a próxima utilização.
 - Não utilizar outros produtos químicos na limpeza, que não seja álcool na parte metálica e, água e sabão nas demais partes.
 - Não permita que líquidos sejam inseridos no equipamento

Cuidados com relação ao posicionamento do paciente sobre o tampo dos equipamentos:

- Antes do procedimento, trave os rodízios fixando a mesa no chão.

5 – Desempenho do Produto

5.1 – Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto

Indicação : Clínicas, consultórios e hospitais.

Finalidade . : Usadas como suporte de pacientes nas seguintes condições:

- Tratamento em RPG
- Exames
- Massagens

Projetada para essas condições, possibilitando o seu uso por longos períodos sem comprometimento do posicionamento determinado.

5.2 – Efeitos secundários ou colaterais indesejáveis e contra-indicações

Contra indicado para pessoas acima de 150 Kg.

5.3 – Segurança e eficácia do produto

Este equipamento é totalmente seguro e eficaz, pois além de ser somente um produto auxiliar (apoio do paciente), foi projetado e fabricado com materiais padrões e montado de forma tradicional (parafusos).

Desde que mantidos (armazenados) e conservados conforme mencionados no item 2 desta Instrução de Uso, o equipamento não perderá ou alterará suas características físicas e dimensionais.

6 – Instalação ou Conexão a Outros Produtos

O equipamento não tem como finalidade ou uso, a conexão direta com outros equipamentos. Somente é possível a instalação de acessórios e opcionais fabricados pela Sophia Móveis.

7 – Instalação. Manutenção Corretiva e Preventiva

7.1 – Instalação do Produto

Transportar o equipamento, na embalagem, até o local de instalação;
Retirar as fitas de arqueamento e abrir a caixa;
Retirar a mesa do pallet de madeira e os componentes dentro da estrutura;
Retirar a fita fixadora da mesa;
Colocar o equipamento no local apropriado;
Instalar os acessórios e opcionais adquiridos.

7.2 – Manutenção Corretiva

Quando ocorrer danos em uma ou mais partes do equipamento, segregue-o e identifique com uma etiqueta que o mesmo está "em manutenção", para evitar o uso indevido.

PROBLEMA	CAUSA
Vazamento de óleo	Verifique as conexões hidráulicas ou os anéis dos pistões. <i>Nota: verificação exclusiva pela assistência técnica Autorizada.</i>
Movimento paralisado	Verifique se existe óleo no circuito hidráulico ou se o pistão está travado. <i>Nota: verificação exclusiva pela assistência técnica Autorizada.</i>

NOTA: Para qualquer problema apresentado, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada, cujos telefones e endereços podem ser obtidos através do atendimento ao cliente na fábrica através do Telefone/Fax: (18) 3652.2807.

Caso seja necessário o envio do equipamento para Assistência da Fábrica, encaminhe o equipamento para o seguinte endereço:

Após a limpeza deve-se fazer a desinfecção do equipamento.

SOPHIA MÓVEIS e Componentes LTDA. Epp.

Rua Otacílio Ferraz Pacheco, 220 – Vila Independência

CEP: 16300-000, Penápolis – SP

CNPJ: 09.627.437/0001-24 Inscr. Est. 521.144.831.115

E-mail: atendimento@sophia.ind.br Fone/Fax (18) 3652.2807

Nota: Ao enviar o equipamento, envie também um descritivo do problema assim como cópia da Nota Fiscal.

7.3 – Manutenção Preventiva e Conservação

A manutenção Preventiva deverá ser feita a cada 6 meses, com o objetivo de verificar o funcionamento do equipamento, tal como o deslizamento dos rodízios, as conexões hidráulicas, o desgaste dos mancais, etc.

A Manutenção Preventiva deverá ser realizada exclusivamente pela Assistência Técnica Autorizada, devendo para isso ser solicitada conforme informado no item (manutenção corretiva) desta Instrução de Uso.

Para conservação, mantenha o equipamento limpo, desinfetado e acondicionado conforme item 8 abaixo.

8 – Procedimentos Adicionais para Reutilização

8.1 – Limpeza

Nas partes metálicas proceder a limpeza com álcool;

Nas partes dos colchonetes proceder a limpeza com água e sabão;

Não utilizar outros produtos químicos na limpeza para evitar riscos de corrosão ou manchas no curvim;

8.2 – Desinfecção

Realiza-se a assepsia habitual acrescida de um germicida ou produto desinfetante de largo espectro, tomando-se o cuidado de não deixar resíduos que possam provocar qualquer ação tóxica ao entrar em contato com o paciente.

Emprego de desinfetantes à base de álcool:

Os desinfetantes podem ser adquiridos no mercado com as mais diversas concentrações.

A SOPHIA MÓVEIS não se responsabiliza pela utilização de preparados cujos componentes diferem das nossas indicações.

8.3 – Acondicionamento

Acondicionar o equipamento em local limpo e seco (protegido da chuva ou de umidade excessiva).

9 – Procedimentos Adicionais Antes da Utilização do Produto

Instalar o equipamento conforme descrito no item 7.

Mesmo na primeira utilização, o equipamento deverá ser limpo e desinfetado, devendo seguir os mesmos procedimentos adicionais para reutilização, conforme descrito no item 8 desta Instrução de Uso.

10 – Precauções em Caso de Alteração do Funcionamento do Produto

Caso o equipamento apresente qualquer anormalidade, verifique se o problema pode ser resolvido pelo próprio usuário, caso este problema não envolva o uso de ferramentas. Se não for possível solucionar o problema, solicite a assistência técnica autorizada. Neste caso, solicite os serviços da assistência técnica autorizada através do Email atendimento@sophia.ind.br ou através do atendimento ao cliente na fábrica pelo telefone: (18) 3652.2807.

11 – Sensibilidade a Condições Ambientais Previsíveis nas Situações Normais de Uso

Este equipamento foi projetado para não ser sensível a interferências como campos magnéticos, influências elétricas externas, descargas eletrostáticas, a pressão ou variação de pressão, pois o mesmo não possui partes elétricas.

Verifique as condições apropriadas no item 2 - Condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto:

12 – Precauções em Caso de Inutilização do Produto

Para evitar contaminação ambiental ou uso indevido deste equipamento, quando o mesmo for inutilizado, este deve ser segregado, embalado, identificado e enviado (por conta e risco do cliente) para a fábrica SOPHIA MÓVEIS para fazer o seu devido descarte com segurança.

13 – Termo de Responsabilidade

A empresa Sophia Móveis e Componentes Ltda., representada por seu Responsável Técnico João Orives Sophia e por seu Representante Legal Osni Aparício Vidal, abaixo assinados, assumem a responsabilidade técnica e legal pelo produto e que todas as informações prestadas referente ao produto MESA REGULÁVEL PARA EXAME E TRATAMENTO MODELO PHR-700, contidas nestas Instruções de Uso, são verdadeiras.

14 – TERMO DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA

A empresa **SOPHIA MÓVEIS E COMPONENTES LTDA EPP**, cadastrada pelo CNPJ 09.627.437/0001-24, situada à Rua Otacílio Ferraz Pacheco, 220, na cidade de Penápolis, São Paulo, garante ao comprador original do aparelho abaixo qualificado, que o mesmo está isento de qualquer defeito oriundo da fabricação, montagem ou das matérias primas a ele empregadas.

PRODUTO: MESA REGULAVEL MODELO PHR-700

NOTA FISCAL N°: _____

DATA DE EMISSÃO: ____ / ____ /20 ____

Desta forma, oferece uma garantia pelo prazo de 12(doze) meses a este produto e acessórios contados a partir da data de entrega e vistoria do produto pelo receptor.

A ocorrência de qualquer defeito de fabricação, devidamente comprovado durante o período supracitado (Tempo de Garantia), assegura ao comprador original, a troca ou o reparo do aparelho defeituoso a critério da fabricante, desde que se enquadre nas condições já especificadas deste Termo.

À SOPHIA MÓVEIS é facultado o direito de introduzir modificações ou paralisar a fabricação de seus equipamentos sem prévio aviso.

NORMAS PARA VALIDAÇÃO DA GARANTIA:

1. A Nota Fiscal de compra deverá ser apresentada para validação desta garantia;
2. Apresentação do presente termo de garantia devidamente preenchido e assinado pelo comprador ou revendedor à SOPHIA MOVEIS;
3. Durante o prazo de garantia estabelecido, a empresa assume o compromisso de substituir ou consertar, sem ônus, as peças defeituosas após análise de seu departamento técnico;
4. As despesas de eventual transporte e frete do equipamento até a assistência técnica, correm por conta do usuário comprador;
5. Quaisquer reparos, modificações e substituições de correntes de defeitos de fabricação, não interrompem nem prorrogam o prazo de garantia;
6. Não serão cobertas, peças que porventura vierem a ser trocadas ou modificadas dentro de qualquer prazo, por danos causados por mau uso ou conservação.

NORMAS QUE INVALIDAM A GARANTIA:

Este termo não abrange cobertura por danos originários de:

1. Avarias causadas no transporte ou armazenamento inadequado ou de formas não autorizadas e reconhecidas legalmente pela remetente (transporte próprio pelo comprador);
2. Quanto ao acuse de recebimento da mercadoria pelo comprador, e o mesmo não ter reclamado de danos no prazo máximo de 03(três) dias contados da data da entrega;
3. Desgaste no acabamento, partes e/ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não-previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
4. -Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto;
5. Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
6. Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva;
7. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
8. Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
9. Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
10. Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição a intempéries, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nessas condições.

Penápolis, 17 de setembro de 2010

Responsável Técnico

João Orives Sophia
CREA-SP 0601537989

Representante Legal

Osni Apparício Vidal
Sophia Móveis e Componentes Ltda.